

Aufbauanleitung Desinfektionsmittelsäule




Enthaltene Teile -> Säule

1. Bodenplatte (Metall, pulverbeschichtet)
2. 2 x Säulenstücke à 1 m Länge
3. Display mit Rahmen für A3 Flyer
4. Spenderrückwand mit Spezialbohrung
5. Aluminium Platte für Spenderrückwand




6. Befestigungsset
 - a) Säulendeckel
 - b) 4 x Blechschrauben für Säulendeckel (4,2 x 22)
 - c) 4 x Vierkantmutter
 - d) 4 x Maschinenschrauben M5 x 12
 - e) 4 x Maschinenschrauben M5 x 25
 - f) 2 x Verbindungsstücke + 4 Inbusschrauben
 - g) 2 x Inbusschlüssel (3 mm + 2,5 mm)

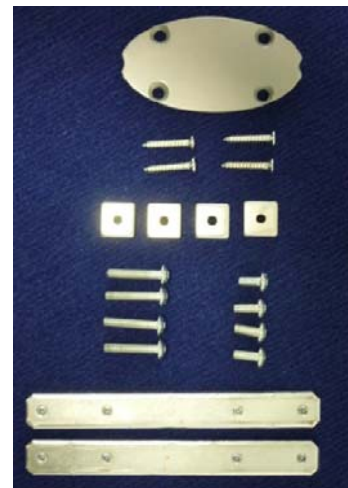

Enthaltene Teile -> Spender


7. Desinfektionsmittelspender
8. Schalenset mit Tropfschale
9. Frontblende

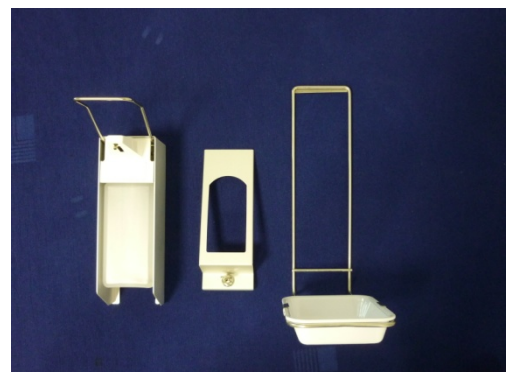

Montage der Säule:


A.

- Alle Teile auspacken (Kartonage entfernen) und auf Vollständigkeit überprüfen.
- Die Bodenplatte mit den Gummifüßen nach unten an das erste Säulenstück montieren. Hierfür die Schrauben 4 x M5 x 25 (6e) verwenden
- Das Säulenstück mit montierter Bodenplatte hinstellen.

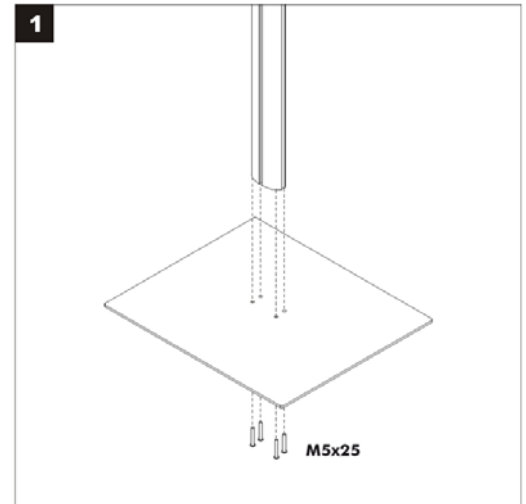


B.

- Die Verbindungsstücke (6f) beidseitig je zur Hälfte in das Schienensystem des bereits montierten Säulenstückes einführen und mit den Inbusschrauben arretieren.
- Das zweite Säulenstück aufstecken und ebenfalls mit je 2 Inbusschrauben arretieren.

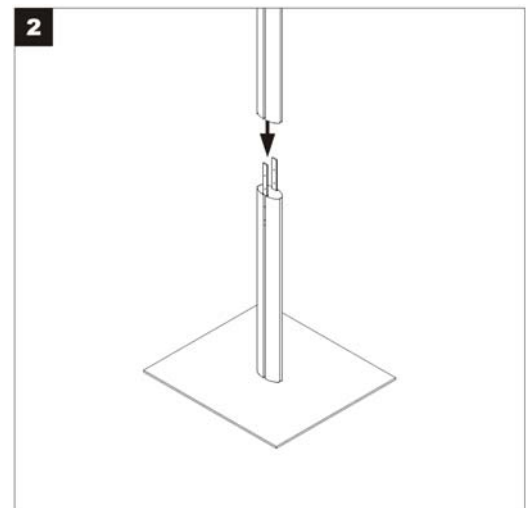

C.

- Durch das gezielte Lösen und Festziehen der einzelnen Inbusschrauben lassen sich die Säulenstücke untereinander bündig ausrichten.

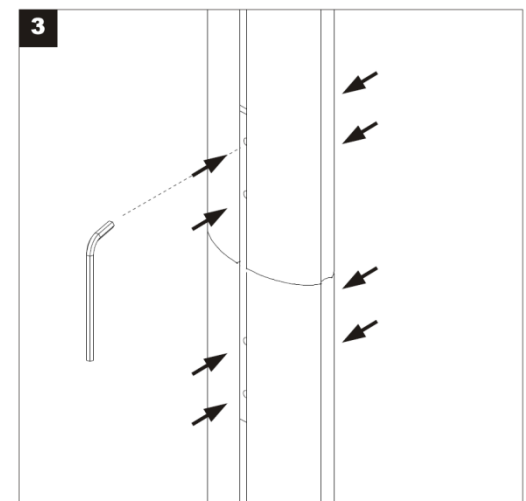


D.

- Die Aluminium Platte besitzt vorgebohrte Löcher für beide Spendervarianten 500 und 1.000 ml.
- Die Rückwand des Spenders so auf die Aluminiumplatte legen, dass die Löcher übereinander passen.
- Das längere Stück der Aluminiumplatte zeigt dabei nach unten.
- Nun in beide Löcher eine Schraube M5 x 12 (6d) einstecken und von hinten mit je einer Vierkantsmutter (6c) an kontern.
- Es bleibt hier ein Spalt zwischen Vierkantsmutter und Aluminiumplatte bestehen.



E.

- Die Rückwand von oben in das Schienensystem der Säule einführen und bis zur gewünschten Position schieben.
- Durch das Festziehen der zwei Schrauben mittels des beiliegenden Inbusschlüssels wird die Rückwand an gewünschter Position fixiert.

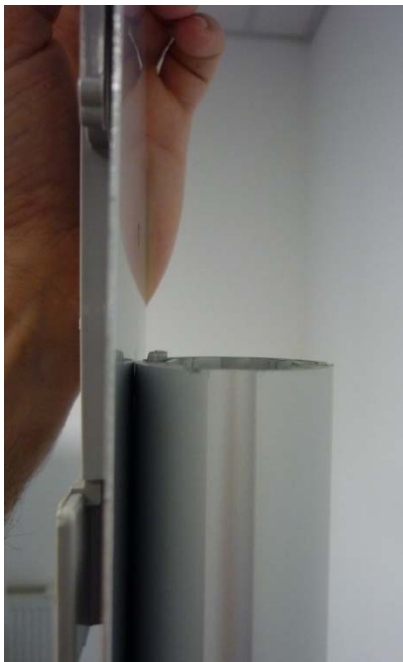

F.

- Das Display oben und unten aufklappen.
- In die vorhandenen Löcher je eine Schraube M5 x 12 (6d) einstecken und von hinten mit der Vierkantmutter (6c) an kontern.
- Das Display von oben in das Schienensystem der Säule einführen und an gewünschter Position durch Festziehen der Schrauben fixieren.



G.

- Den Deckel auf das obere Säulenende auflegen und mit den vier Blechschrauben (6b) befestigen.
- Hierfür wird ein Kreuzschraubendreher benötigt.



H.

Montage / Spender / Schalenset / Frontblende

- Der Spender wird auf die bereits montierte Spenderrückwand von oben aufgeschoben bis der Spender einrastet.
- Flasche mit dem gewünschten Medium in den Spender einsetzen.
- Das Schalenhalterset von oben über den Spender stülpen.
- Anschließend die Frontblende einsetzen und verschließen.



Die Säule ist nun fertig montiert und einsatzbereit.